

PEDAL Phillips

PASO A PASO

Instalar Pedal Phillips en PACS MediReport

PASO A PASO
Instalación de pedalera MediReport

1

Se instala MediReport Local o Web



2

Se debe descargar los siguientes Drivers de la Pedalera Phillips y el SDK



PhilipsDeviceControlCenterSetup. Nos permite realizar la instalación de los drivers de la pedalera y la app de configuración llamada Phillips Device Control Center. Permitiendo crear perfiles para la configuración de las Apps.



SpMikeCtrl: SDK que permite realizar la comunicación de las apps de Medilab con el pedal Phillips

Link de descargas:


https://drive.google.com/drive/folders/1YRbb3m7n4dIFgJAeWPfpDjKGr9yR0ajb?usp=share_link

3

Configuración del Pedal.

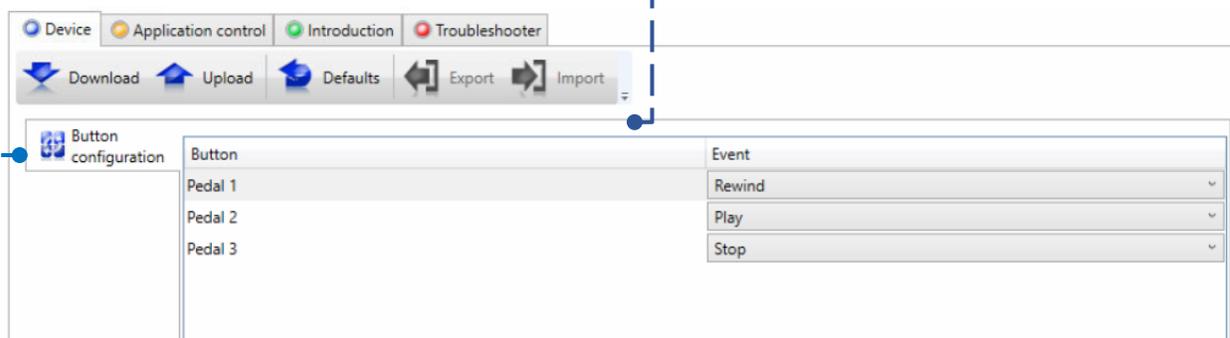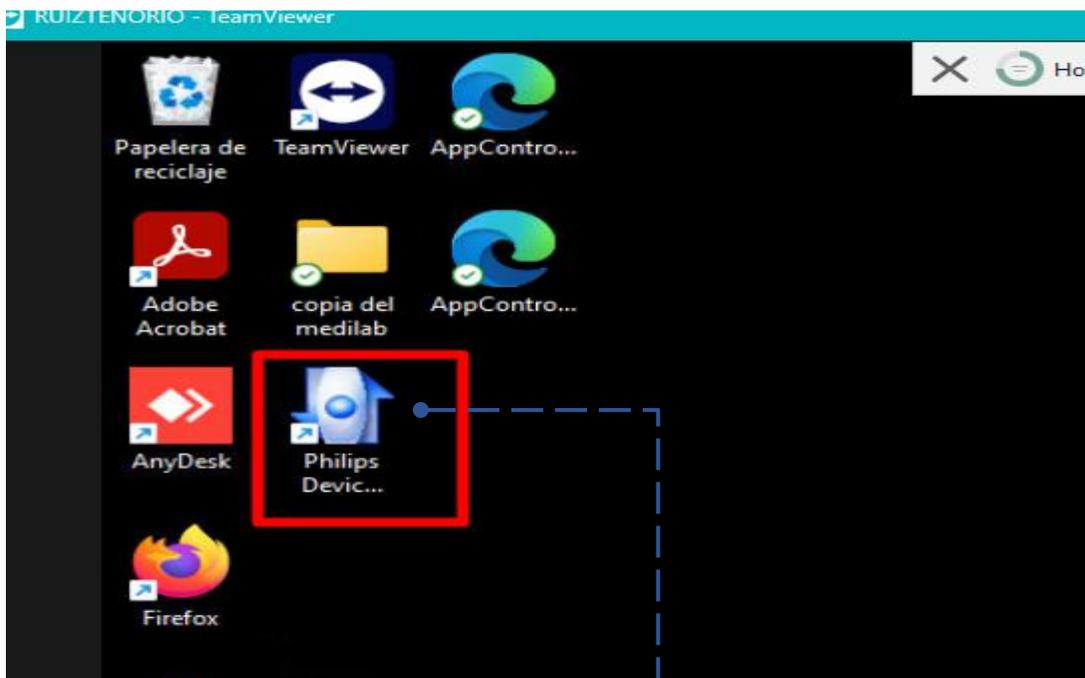


Configuración de los 3 botones del pedal.


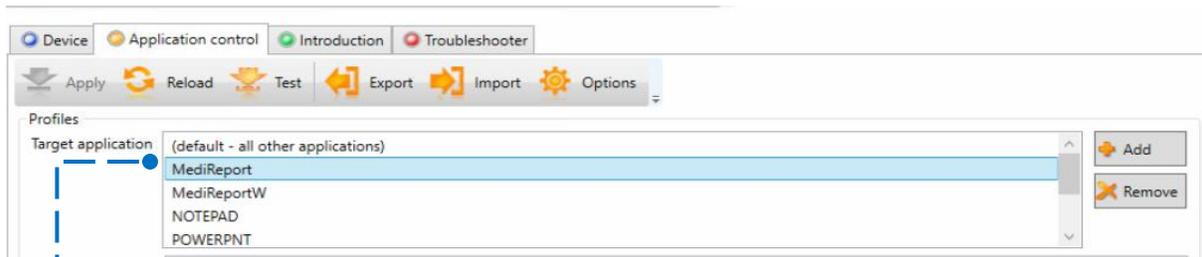


Crear el perfil para la apps que se van ha usar. Se debe nombrar tal como se evidencia el ejecutable administrador de tareas.

Para MediReport Local se debe crear MediReport
Para MediReport Web se debe crear MediReportW

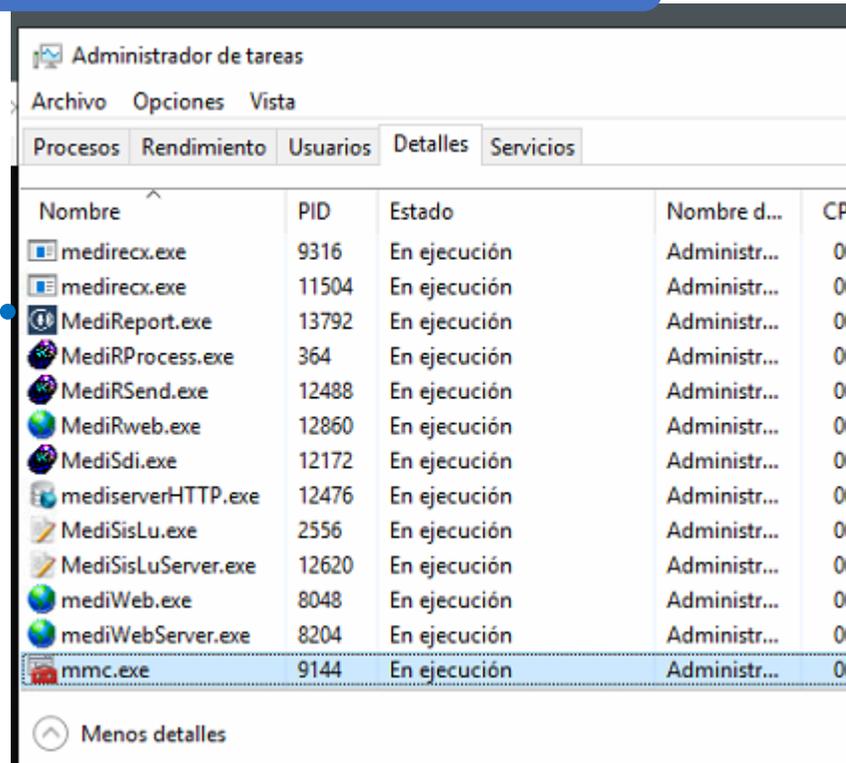

Se selecciona el perfil y se configura los botones.

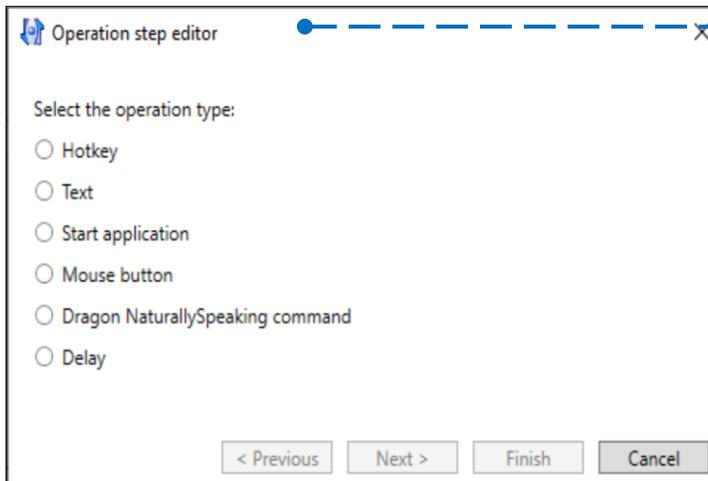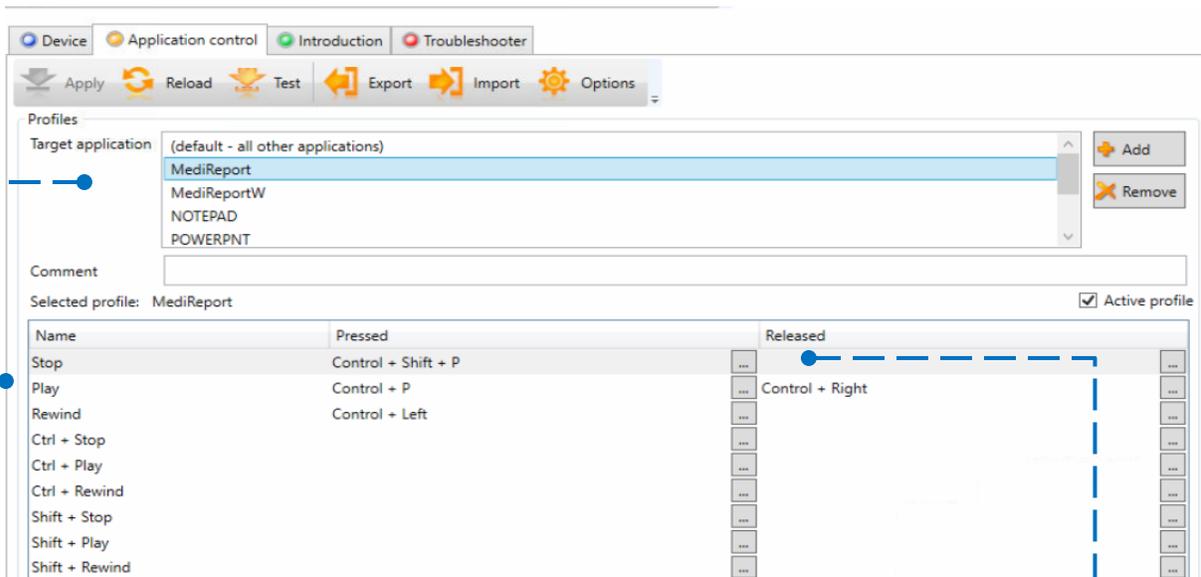

Stop: Control + Shift + p
Play: Control + P y/o Control + Right
Rewind: Control + Left

3

Iniciar el flujo de transcripción.



Exámenes

Buscar por: Nombre Texto:

Período: 27/01/2023 a 30/03/2023 Modalidad: Todas Actualizar

Unidad: Todas Filtro: Todos

Sólo los dictados Sólo urgentes Meus referenciados Urgentes para digitação Retorno de áudio

No. Examen	Nombre	Fecha	Modal.	Id. Paciente	Urgente	Nº Acceso	Urc Examen
5309720	MANUEL CARLOS ORTIZ URBANO	25/02/2023	CT	5309720		35250	TAC TORAX

Clique aqui para definir o filtro

Examen dictado Reconvocación Pendiente Examen siendo digitado Examen Urgente

Emitir Laudo Tornar urgente digitação Notificar problema áudio

Informes Finales

Paciente: MANUEL CARLOS ORTIZ URBANO Fecha Examen: 25/02/2023 Id. Paciente: 5309720

Examen: TAC TORAX SYC Núm. Examen: 5309720 Núm. Informe:

Bookman OI Plantillas de Informe

FECHA :25/02/2023

SERVICIOS :TAC TORAX SYC

PACIENTE :MANUEL CARLOS ORTIZ URBANO

DOCUMENTO :5309720

No. ESTUDIO :5309720

TAC TORAX SYC

Cant. Películas: 0 Cant. CDs: 0 Cant. de Exámene: 1 Contraste:

Médico Solicitante

Médico Emisor: HECTOR FABIO VARELA

Firma Emisor Firma Revisor

Finalizar informe Tipo de Informe: Proinsalud Versión: Ins. Cuerpo

Guardar Guardar e Imprimir Guardar e Inc. Informe Guardar y Email Imprimir Email Salir

Se reproduce el audio con los botones del Pedal

www.medilabsistemas.com.br

-  /medilabsistemas
-  /in/medilabsistemas
-  /sistemasmedilab

