


MEDIWORKS10

PASO A PASO


# CONFIGURACION POSICION VENTANAS

PASO A PASO  
CONFIGURACION POSICION VENTANAS

**1** Identificar y seleccionar MENU > CONFIGURAR PANTALLA.

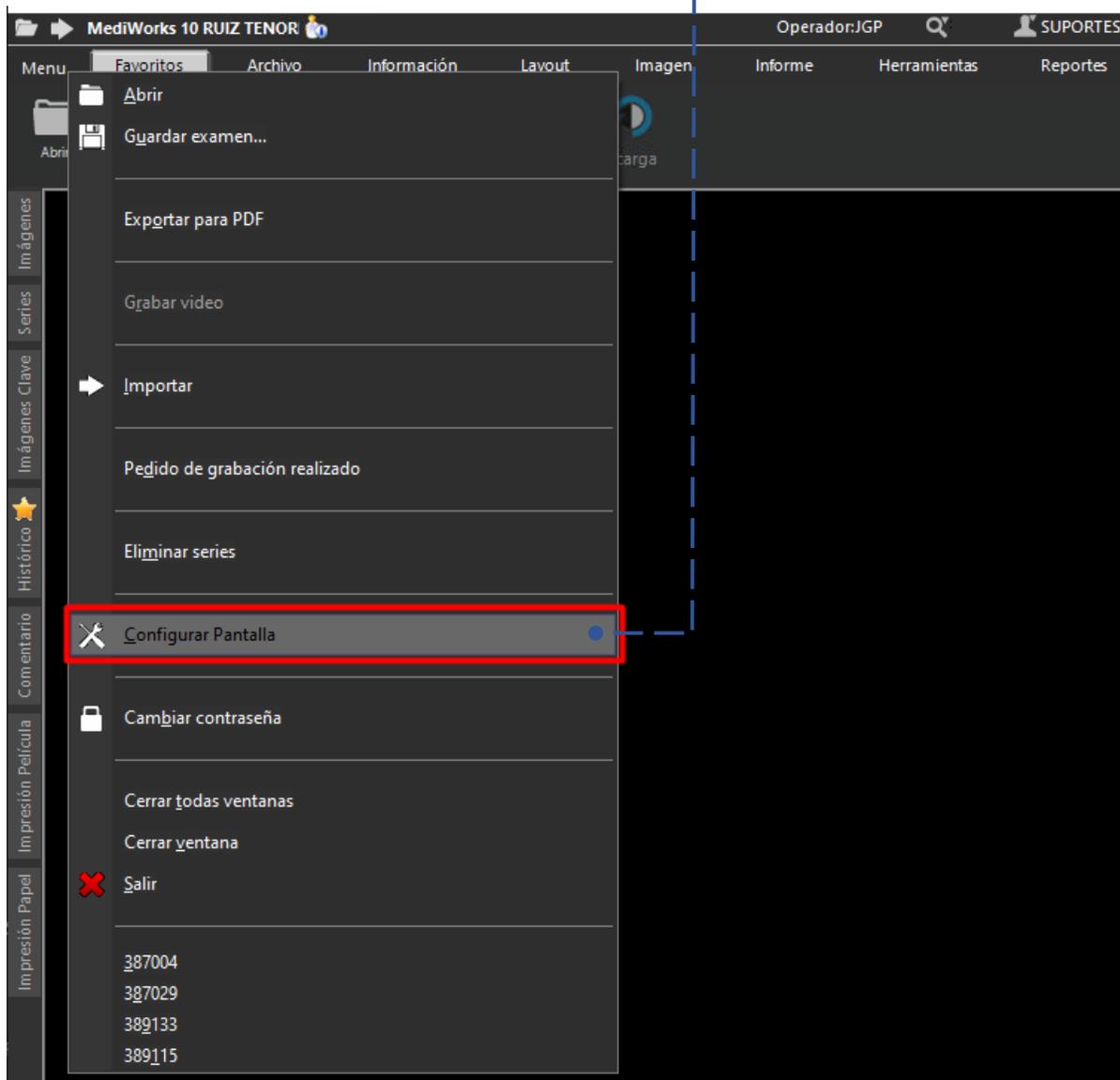

**2** Identificar y seleccionar la pestaña POSICION

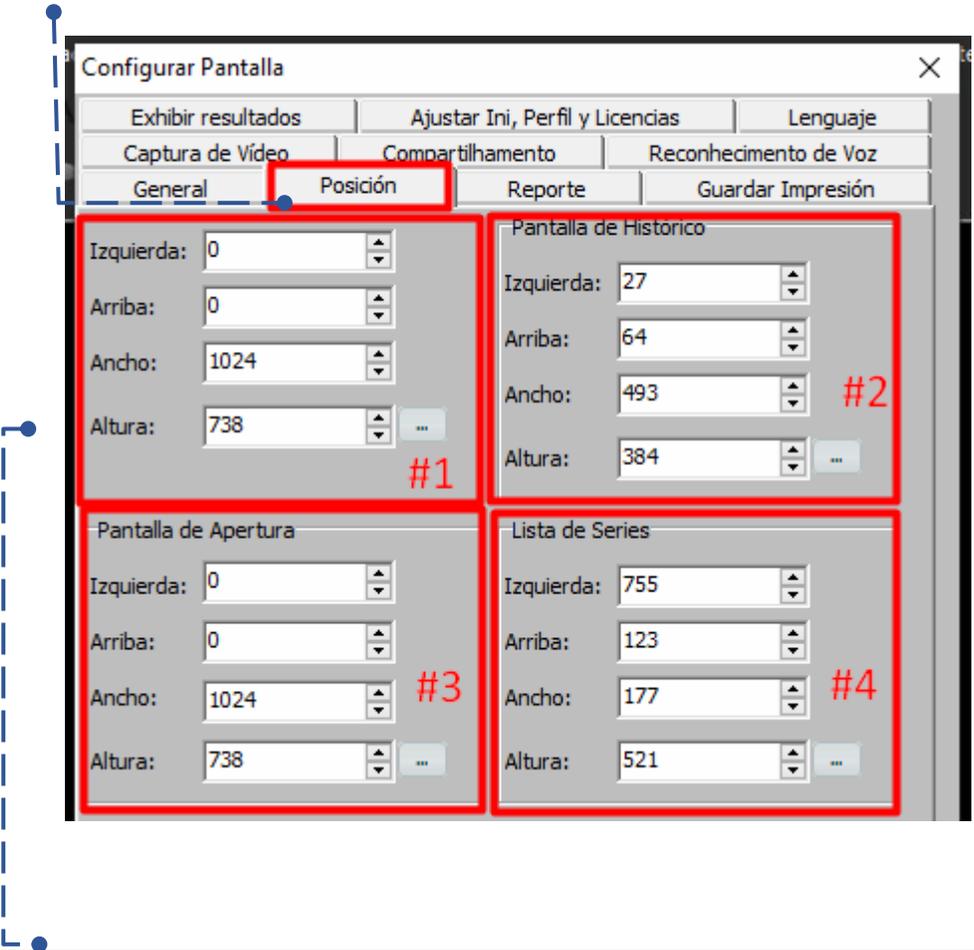

SECCION	VENTANA
#1	La sección marcada como #1, son los datos de posición correspondientes a la ventana del visor de imágenes.
#2	La sección marcada como #2, son los datos de posición correspondientes a la ventana de la pantalla de histórico.
#3	La sección marcada como #3, son los datos de posición correspondientes a la ventana de la lista de trabajo.
#4	La sección marcada como #4, son los datos de posición correspondientes a la ventana de series.

**3** Identificar y seleccionar la opción marcada.


The screenshot shows the 'Configurar Pantalla' window with the following settings:

General	Posición	Reporte	Guardar Impresión
<b>Pantalla de Histórico</b>			
Izquierda:	0	Izquierda:	27
Arriba:	0	Arriba:	64
Ancho:	1024	Ancho:	493
Altura:	738	Altura:	384
<b>Pantalla de Apertura</b>			
Izquierda:	0	Izquierda:	755
Arriba:	0	Arriba:	123
Ancho:	1024	Ancho:	177
Altura:	738	Altura:	521

A red box highlights the '...' button next to the 'Altura' field in the 'Pantalla de Histórico' section.

4

Ubicar la ventana emergente generada, que tomará los datos de posición al momento de ubicarla en el espacio requerido, y cerrarla.

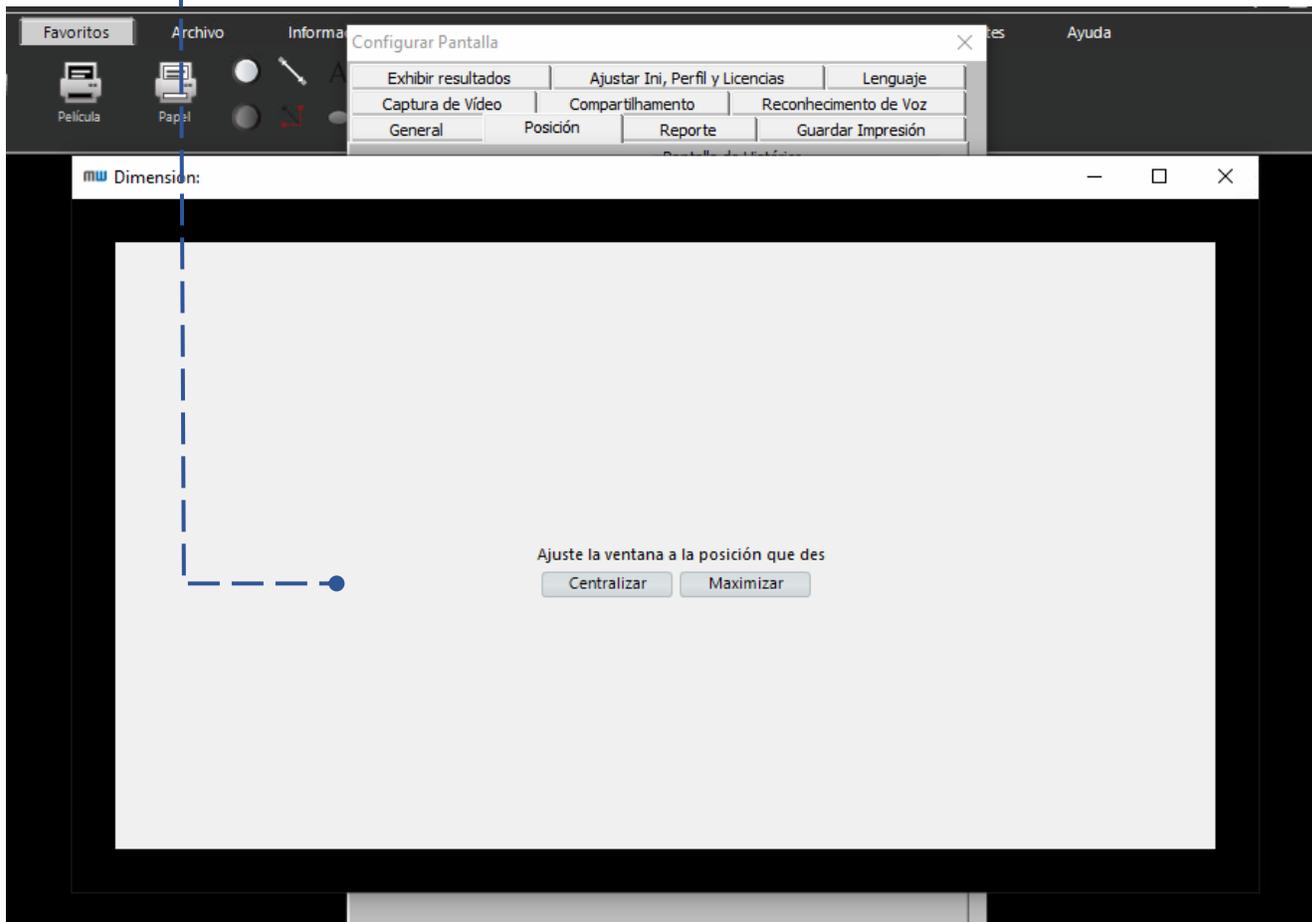

Una vez realizado el proceso, se deben guardar los cambios generados con la opción OK.

[www.medilabsistemas.com.br](http://www.medilabsistemas.com.br)

 /medilabsistemas

 /in/medilabsistemas

 /sistemasmedilab